



# ANVÄNDARINSTRUKTION

## ANDNINGSSKYDD

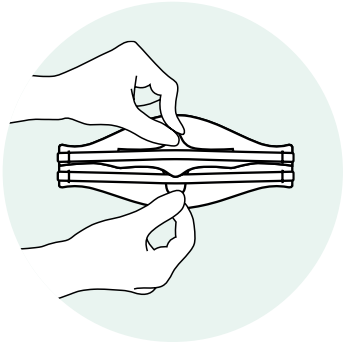


1. Vänd upp den motsatta sidan och använd flikarna för att dra isär de övre och nedre panelerna.

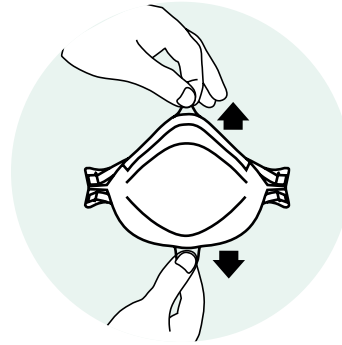

2. Dra i hak- och näspanelernas flikar tills näsbygeln böjs. Se till att båda panelerna har vikts ut helt.



3. Håll i ventilen och sätt skyddet mot ansiktet. Använd den andra handen för att dra remmarna över huvudet.

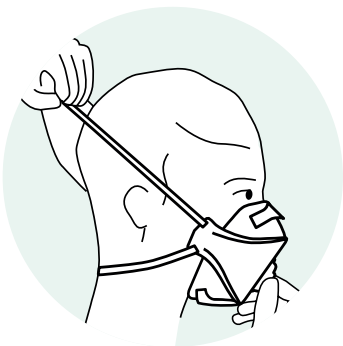

4. Känn efter så att remmarna och munskyddet sitter bekvämt.



5. Använd båda händerna och forma näsbygeln efter näsans form för att få en bra passform och tätning.



6. Justera passformen genom att andas in kraftigt. Om luft läcker ut justerar du näsbygeln för att eliminera läckage.